

GREEN PRESS 12

- Aparat za medicinsko ali kozmetično limfno drenažo z 2 x 12 izhodi
- Odličen za terapijo limfnih edemov različnih vrst
- Zelo učinkovita osnovna terapija celulita in dobra preventiva oteklih nog in krčnih žil
- Sedem stalnih in 14 prostih programov
- Nastavljivi parametri drenaže - pritisk, čas kompresije in pavze, čas terapije

CE 0123



GREEN PRESS 12

Moderna mikroprocesorsko krmiljena aparatura s posebno nadtlučno črpalko vpihava zrak pod določenim – nastavljivim tlakom v pnevmatično ločene, a mehansko združene manšete. GREEN PRESS 12 ima več stalnih, računalniško vodenih programov, ki omogočajo različno zaporedje polnjenja posamičnih komor manšet in tudi število polnih komor in/ali manšet. Poleg stalnih programov je mogoče ustvarjati tudi lastne, ki jih po želji brišemo ali spreminjamo. Sestaviti je mogoče enostavne (eno samo zaporedje polnjenja komor) ali kompleksne (več različnih zaporedij polnjenja komor) programe. Parametri programov – tlak v manšetah, trajanje kompresije, trajanje premora med kompresijami in trajanje pavze – so individualno nastavljivi in prilagodljivi vsakemu pacientu posebej.

Na voljo so manšete dveh vrst. Za oboje je značilno, da so septirane – iz več pnevmatsko ločenih komor, ki se delno prekrivajo in tako omogočajo najbolj fiziološki način limfne drenaže. Razlikujejo se le po načinu aplikacije na pacienta in vrsti materiala, iz katerega so izdelane.

Aparat ima dvanajst ločenih priključkov za posamezne komore na manšetah. Priključiti je mogoče vse manšete za hkratno limfno drenažo obeh nog, zadnjice in trebuha. Posebej je mogoče drenirati tudi eno ali obe roki.

Uporaba aparata GREEN PRESS 12 je lahka in enostavna. Zaradi visoke kvalitete in profesionalnosti same aparature jo priporočamo vsaki fizioterapevtski enoti, kot pomoč pri ročni limfni drenaži.

Njen terapevtski učinek je nenadomestljiv tako v zgodnji kot v pozni fazi rehabilitacije mnogih patologij. Priporočamo jo tudi ustrezno usposobljenim kozmetičnim salonom, ki pod strokovnim vodstvom izvajajo limfno drenažo kot eno izmed preventivnih metod v boju proti celulitu.

V kombinaciji z drugimi anticelulitnimi metodami da zelo dober rezultat.



INDIKACIJE:

- Medicinske:
- primarni limfatični edem
 - sekundarni limfatični edem
 - edem po poškodbi
 - kronična venska insuficienca
 - varice, stanja po operaciji ožilja
 - razjede goleni
 - profilaksa venske tromboze
- Kozmetične:
- povečana telesna teža
 - občutek težkih nog
 - celulit

KONTRAINDIKACIJE:

- edemi pri popuščanju srca
- jetrni edemi
- insuficienca ledvic
- tromboza
- tromboflebitis
- vročica
- tuberkuloza
- aktivni rakavi proces
- mikro in makroangiopatije pri diabetesu,
- mb. Burgerju, mb. Raynaudau

Tehnični podatki:

Tip aparata:	GREEN PRESS 12
Napajalna napetost:	230 V, 50/60 Hz
Priključna moč:	80 VA
Tip varovalke:	2x1,6 AT
Masa aparata:	8,2 kg
Masa aparata z manšetami:	16,7 kg
Dimenzije aparata:	500 x 410 x 220 mm
Varnostni razred:	I
Tip aplikacijskega dela:	BF
Klasifikacija MDD 93/42/EEC	IIa
Število priključkov za masažne celice:	2 x12
Nastavljivi pritisk:	0 do 22 kPa
Nastavljivi elementi masaže	
- pritisk v celicah manšete	0 do 22 kPa
- trajanje pritiska	0 do 90 sekund
- interval vključevanja celic	0 do 90 sekund
- način vključevanja celic	linijski - ena za drugo

	do zadnje točkovni - ena po eno krožni - po več v valovih proti srcu ali v obratni smeri do 90 minut
- smer masiranja	
- trajanje masaže	
Število standardnih masažnih programov:	7 v spominu aparata
Število prostih masažnih programov:	14
Standardna oprema:	manšeta za nogo - 2 kos manšeta za stopalo - 2 kos manšeta za pas - 1 kos manšeta za boke - 1 kos manšeta za roko - 1 kos priključna vrvica: 230V Eurovtič
Navodila za uporabo	
Dodatna oprema:	kozmetična manšeta razširitveni trak

Iskra Medical d.o.o.,

Stegne 23, 1000 Ljubljana,
tel.: ++386 (0)1 513 15 00, 513 15 04,
faks: ++386 (0)1 513 15 10,

mobitel: 041 622 918,
e-mail: medical@iskramedical.eu,
http://www.iskramedical.eu

